



7.加熱工作完成時，AL1燈亮起後，即可進行下一步工作。



產品規格：

〔四組加熱孔型熔解爐〕

型號：MF - 40

使用電壓：110V

使用電流：7.2A

功率：800W

感溫棒：K3 - TYPE

電熱線：110V 200W - 1.8A四組並聯式

尺寸：140mm (長) / 175mm (寬) / 330mm (深)

重量：8KG

〔雙組加熱孔型熔解爐〕

型號：MF - 20

使用電壓：110V

使用電流：3.6A

功率：400W

感溫棒：K3 - TYPE

電熱線：110V 200W - 1.8A兩組並聯式

尺寸：140mm (長) / 155mm (寬) / 260mm (深)

重量：7KG

產品保固與維修：

- 1.新品出廠一年內，正常使用機器零件自然故障（耗材除外）享有免維修費服務。
- 2.以下保固範圍必須酌收或是全額負擔維修費：
 - a.機器內耗材（感溫元件、加熱元件）
 - b.天災因素或是人為疏失（操作不當、機器放置位置不當...等）
 - c.擅自變造機器內部導致機器損毀
- 3.操作諮詢或是故障維修請聯絡您的原購買經銷商，以確保權益。

彈性床熔解爐 MF-20 / MF-40

使用說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣，說明書中標記為  為必須注意事項，請務必閱讀。

為了讓您能夠正確地操作本機器設備，我們建議您請詳細閱讀本說明書。
本說明書上產品電源規格僅供參考，請以實際機器後方銘牌為主。

檢查出廠附屬品：

當拆開包裝箱後，請確認是否有以下出廠附屬品；若缺少下列出廠附屬品，請通知您所購入的經銷商，以確保您的權益。

- 使用說明書 x1
- 加熱料管 x2(適用於MF-20機種) / 加熱料管 x4(適用於MF-40機種)
- 料管夾 x1
- 漏斗 x1

辨別您的產品所使用電壓：

為了確保您的機器能夠確認在正確的電壓下使用，將機器拆封後請尋找機器後方銘牌位置，檢視該銘牌所標示 "VOLTS" 所標示為 110V 或是 220V，請務必將機器插於正確電壓的插座，以避免機器造成故障損毀。

請注意使用上安全：


此產品在運作過程中會產生高溫，請注意以下兩點：

1. 機器鑄造時請勿觸碰溶解槽，以避免發生燙傷
2. 請勿將機器接近於易燃物品，以避免發生火災

產品各部功能介紹：


< 機器主體 >

1. 溶解槽
2. 蜂鳴器
(鑄造工作完成時以蜂鳴通知)
3. 電源開關
4. 數位溫度控制器
(設定鑄造工作溫度)
5. 保險絲座
6. 電源線

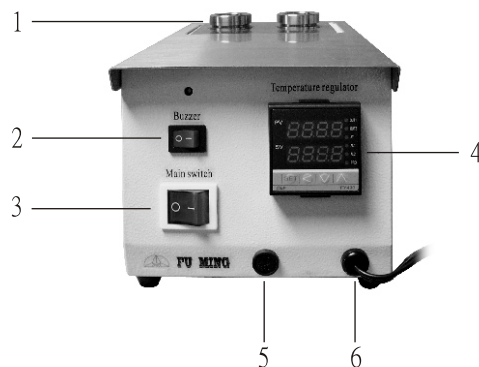

< 數位溫度控制器 >

1. P V 數字 — 目前溫度值
2. S V 數字 — 設定值/程式預測溫度值
3. O U T 1 — 輸出指示燈
4. A L 1 — 溫度保留指示燈
5. S E T — 功能鍵與輸入鍵
6. < — 更改鍵與位移鍵
7. v — 下降鍵
8. ^ — 上升鍵

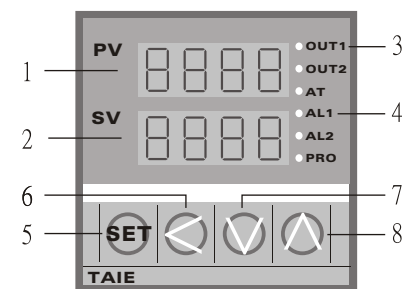

開始鑄造工作：

假設鑄造工作的溫度為 250°C，請參考以下的使用流程。

(以下範例深黑色代表為閃動狀態)

1. 開啟電源開關



2. 按一下 "<" 鍵使SV值個位數閃爍



3. 按一下 "<" 鍵使SV值在十位數閃動
連續按 "^" 鍵直到SV值十位數顯示"5"



4. 按一下 "<" 鍵使SV值在百位數閃動
連續按 "^" 鍵直到SV值百位數顯示"2"



5. 按一下 "SET" 鍵使SV值停止閃爍
此時 "OUT1" 亮起即開始加熱工作



6. 打開蜂鳴器開關，完成時以蜂鳴通知
(選用步驟)

↓ (加熱中)