


為了讓您能夠正確地操作本機器設備，建議您請詳細閱讀本說明書。  
本說明書上產品電源規格僅供參考，請以實際機器後方銘牌為主。

## 產品各部功能介紹：

1. 電壓調整鈕
2. 充電指示燈
3. 放電指示燈
4. 強弱控制開關
5. 點焊手動桿
6. 固定式點焊座
7. 電源開關
8. 腳踏控制器
9. 活動式點焊夾
10. 電壓輸出連接座
11. 點焊座固定門

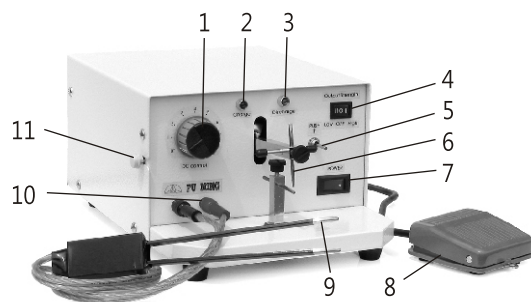

## 產品特色：

- 瞬間充電，使用方便。
- 焊接強度，分段調整。
- 點狀焊接不銹鋼條，操作容易。
- 體積小，不占空間，工作順手。

## 操作說明：

當您使用本機器前，請參考下列步驟來操作本機器：

1. 開啟電源開關，充電燈（紅燈）亮起。
2. 調整工作電壓至適當區段，依點焊物件不同切換適當強弱。
3. 固定式點焊座上端向上推起，使用固定門向右推將上端固定。
4. 將鋼線與鋼製環架等點焊物置放在固定座下端點焊棒前端。
5. 將固定門向左拉放，固定式點焊座上端會彈回至欲點焊處。
6. 固定式點焊座上端兩側輔助桿向下壓緊，使與點焊物件緊密接觸。
7. 按壓點焊控制桿，放電燈（綠燈）會亮起隨後熄滅，即點焊完成。
8. 活動式點焊夾操作方式，與固定式點焊座相同。
9. 按壓點焊控制桿亦可改由腳踏控制。

## 注意事項：

1. 嚴禁無點焊物件狀態，空放電點焊操作。
2. 點焊前應檢查點焊棒與點焊物接觸面是否保持光滑，如發現氧化或是污損，請用細砂紙拋光接觸面以達最佳效果。
3. 點焊機使用過程中，應避免劇烈震動。
4. 操作點焊機如無任何反應，請檢查機器後方保險絲是否熔斷。

## 產品規格：

型號：	SP-92
規格：	固定座 / 活動夾 兩用型
電壓：	AC 110 V , 60 Hz
電流：	2 A
尺寸：	L 315 mm / W 212 mm / H 145 mm
重量：	9 KG

## 產品保固與維修：


1. 新品出廠一年內，正常使用機器零件自然故障（耗材除外）享有免維修費服務。
2. 以下保固範圍必須酌收或是全額負擔維修費：
  - a. 天災因素或是人為疏失（操作不當、機器放置位置不當...等）
  - b. 擅自變造機器內部導致機器損毀
3. 操作諮詢或是故障維修請聯絡原購買經銷商，以確保權益。



# 牙科矯正用點焊機 SP-92

## 使用說明書



為了確保您的使用安全與良好的機器使用習慣，說明書中標記為  為必須注意事項，請務必閱讀。

FU-MING Enterprise Co., Ltd.

<http://fu-ming.tw>